

INFORMATION

No. 2407-24

結核菌群核酸同定/リアルタイムPCR に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、再委託先より標記項目で使用している測定試薬について、一部非結核性抗酸菌との交差反応性が確認された旨の連絡がありましたので、以下の通りお知らせいたします。

先生方には急なご連絡で大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 検査項目

結核菌群核酸同定/リアルタイムPCR [コード 5906]

■ 内容

試薬製造販売元より、「測定試薬の『コバス 6800/8800 システム MTB』において、非結核性抗酸菌である *Mycobacterium shinjukuense* 及び一部の *Mycobacterium kansasii* との交差反応性が確認された」との連絡がございました。

交差反応により結核菌群 (*Mycobacterium tuberculosis* complex: MTB) が陽性と判定されるケースは稀で、試薬製造販売元の報告では2018年11月に当該試薬が発売されて以降、全世界で測定した患者様のうち、それぞれ約0.00059%で交差反応性が確認されているとのことです。

結核菌群核酸同定/リアルタイムPCR検査が陽性の場合には、従来どおり、臨床所見・塗抹・培養・質量分析法による同定検査などの結果を併せてご判断いただけますようお願い申し上げます。

■ 対象の使用期間

2023年 7月 18日(火) 受領分より使用

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>